

INSTRUÇÕES DE USO PARA CÂNULA PARA PUNÇÃO PERCUTÂNEA UROMED ®

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso de cânulas para punção percutânea.

Indicações:

A cânula está indicada para aspiração e ou infusão percutânea em órgãos.

Descrição do produto:

Cânula de punção em aço inoxidável AISI 304, trefilado, 17 G de diâmetro externo x 19,5 cm de comprimento, com extremidade distal ecogênica, para acompanhamento ao ultrassom, extremidade proximal com conexão luer lock.

Informação e restrições do produto:

- Estéril e apirrogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Produto de reprocessamento proibido conforme item 01 da RE2605 de 2006.
- Esterilizado a óxido de etileno.
- Validade da esterilização: 05 anos.
- Para um uso único.
- Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com os procedimentos.
- A utilização da cânula é transitória (<60 min).
- Observe sempre a data de validade do produto..
- Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar as cânulas de punção percutânea.
- Os materiais perfuro cortantes devem ser descartados conforme a RDC 222 de 28 de março de 2018, da ANVISA.
- Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas menores de 32°C.

Contraindicações:

- Diátese hemorrágica
- Infecção de pele na área de punção.

Efeitos adversos:

- infecção.
- macrohematúria.
- Perfuração.
- Sangramento no local da punção ou no canal de punção.
- Hematoma.

Advertências e precauções:

- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante os procedimentos de introdução e manuseio das cânulas.
- Após a utilização das cânulas, evite contato acidental à mesma pelo alto risco de contaminação.
- Após a retirada da cânula, faça uma compressão eficaz no ponto de introdução para evitar sangramento. (de acordo com o protocolo do hospital).
- Nunca puxe com força a cânula quando for removê-la. Faça-a de maneira cuidadosa.
- Para uso somente por profissional qualificado e familiarizado com os procedimentos.
- Estéril e apirrogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.

Instruções de uso:

- Verifique a indicação e a finalidade do uso da cânula e prepare o material.
- Utilize técnicas estéreis durante os procedimentos descritos abaixo. Isto inclui o uso de luvas, gorro, máscara, campo estéreis.
- Posicione o paciente de acordo com a punção.
- O procedimento deve ser feito sob fluoroscopia ou ultrasonografia.
- Faça uma desinfecção no local de implantação.
- Anestesia o local de acordo com o protocolo do hospital.
- Faça uma incisão na pele.
- Introduza a cânula de punção.
- Realize o procedimento desejado.
- Retire a cânula.

Informações técnicas:

Todos os modelos apresentados são revestidos com Teflon.

Embalagem secundária: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 10 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado Tyvek® (membrana composta 100% de polietileno, sem aditivos) e o outro lado transparente em PETG (polietileno tereftalato).

Cada embalagem primária contém:

01 Cânula de punção percutânea em aço inoxidável 17G de diâmetro externo x 19,5 cm de comprimento.



FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Embalagem secundária: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 10 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado Tyvek® (membrana composta 100% de polietileno, sem aditivos) e o outro lado transparente em PETG (polietileno tereftalato).

Cada embalagem primária contém:

01 Cânula de punção percutânea em aço inoxidável 17G de diâmetro externo x 19,5 cm de comprimento.

ACESSÓRIOS

Não aplicável

Fornecedor:

HTS-Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124
SAC:(31) 36881901 www.medika.com.br

Fabricante:

Uromed Kurt Drews Gmbh
Meessem , 7- Oststeinbek – D-22113
Alemanha Telefax : 49 4071300799

Responsável técnico:

ENF Layse Miranda Ferreira COREN MG: 567.011/MG

ANVISA nº: 10289680096

Legenda da simbologia da rotulagem:



REF

Lote
Data de
fabricação

Data de Validade

Referência

Versão da instrução de uso – Vr.04

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido. Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br