

# INSTRUÇÕES DE USO PARA A CÂNULA DE KARMAN PLASTI-MED

Seringas

## Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovado para o uso da cânula de Karman.

## Indicações:

A cânula de Karman está indicada para aspiração intrauterina e evacuação do conteúdo do endométrio durante a interrupção induzida da gravidez, aborto espontâneo e/ou incompleto, até 12 semanas, biópsia do endométrio, ou como uma medida curativa em caso de dismenorrea, indicados por um médico.

## Descrição do produto:

A cânula de Karman está indicada para aspiração intrauterina e evacuação do conteúdo do endométrio durante a interrupção induzida da gravidez, aborto espontâneo e/ou incompleto, biópsia do endométrio, ou como uma medida curativa em caso de dismenorrea, indicados por um médico. O princípio de funcionamento consiste em aspirar manualmente o conteúdo do endométrio utilizando-se uma seringa de válvula dupla ou única Plasti-med (vendida separadamente) criando um vácuo, que conecta-se à cânula de Karman. A cânula está disponível nos diâmetros 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 e 12 mm por 21 ou 22 cm de comprimento, com extremidade distal fechada e atraumática. A cânula possui um ou dois orifícios laterais e graduação a partir de 06 cm da extremidade distal, a cada 1 cm.

## Informação e condições de manipulação:

- Esterilizado a óxido de etileno.
- Validade da esterilização: 05 anos.
- O fabricante recomenda um uso único.
- A cânula é de uso transitório.
- Observe sempre a data de validade do produto.
- Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar as cânulas de Karman.
- Para a biópsia do endométrio, recomenda-se utilizar uma cânula de 4 mm.
- Recomenda-se que sejam utilizadas as cânulas de Karman de 4; 5; 6 e 7 mm para aborto anterior a 8 semanas e cânulas 8;9;10;11 e 12 mm para aspiração de conteúdo de 8 a 12 semanas.
- O produto deve ser descartado conforme RDC 222, de 28 de março de 2018, da ANVISA.
- Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas menores que 30°C.

## Contra indicações:

- Suspeita de gravidez
- Infecções pélvicas
- Discrasia sanguínea

## Efeitos adversos:

- Infecção
- Lesão uterina e/ou pélvica
- Sangramento

## Advertências e precauções:

- A reutilização deste produto pode causar infecção cruzada.
- Utilize movimentos suaves e delicados aos introduzir e manusear as cânulas. Movimentos bruscos ou fortes podem causar lesões uterinas.
- Se a cânula obstruir, desconecte a cânula da seringa, siga os procedimentos de desobstrução da seringa (vendida separadamente), recoloque a cânula e reinicie a aspiração.
- A utilização das cânulas de Karman devem ser feitas por médico, devidamente habilitado para este procedimento.

## Instruções de uso:

- Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui o uso de luvas, máscara, campos e instrumentos estéreis.
- Remova a cânula de sua embalagem e confira sua integridade.
- Determine o tamanho e a posição do útero através de um exame bimanual.
- Visualize o colo uterino com o auxílio de um espécule e faça uma desinfecção do colo uterino e vagina de acordo com o protocolo do hospital. Verifique se o colo do útero está dilatado.
- Caso o colo do útero não esteja dilatado, proceda à dilatação do mesmo de acordo com o protocolo do hospital.
- Caso haja sinal de infecção, trauma, corpos estranhos ou laceração, inicie o tratamento adequado.
- Estabilize o colo do útero com uma pinça, aplicando delicadamente uma tração.
- Confira a conexão da cânula de escolha à seringa de aspiração de válvula única ou dupla Plasti-med conforme instruções da seringa (vendida separadamente) e confira a devida adaptação da conexão.
- Introduza a cânula adequada delicadamente até o fundo uterino. Se o colo uterino resistir à entrada da cânula, auxilie a extremidade distal da cânula com uma pinça estéril.
- Após a introdução da cânula, conecte a mesma à seringa de aspiração com válvula única ou dupla Plasti-med (vendida separadamente) e realize o procedimento, seguindo as instruções de uso da seringa.
- Aspire o conteúdo uterino, girando a cânula 180 graus para cada lado e, ao mesmo tempo, movendo-a delicadamente para frente e para trás. Para biópsia endometrial, aspire uma pequena amostra de tecido.
- O produto deve ser descartado conforme RDC 222, de 28 de março de 2018, da ANVISA.

## Formas de apresentação:

Embalagem secundária: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 250; 300; 400; 450 ou 600 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado papel grau cirúrgico gramatura 80 gm<sup>2</sup> e o outro lado transparente em PE (polietileno).

Cada embalagem primária contém:

01 cânula de Karman graduada XX mm x 21 ou 22 cm de comprimento, fabricada em polietileno, com 01 ou 02 orifícios

## Código do Produto

240111	Cânula de Karman 4 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios
240112	Cânula de Karman 5 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios
240113	Cânula de Karman 6 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios
240114	Cânula de Karman 7 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios
240115	Cânula de Karman 8 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios
240116	Cânula de Karman 9 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício
240117	Cânula de Karman 10 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício
240118	Cânula de Karman 12 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício
240119	Cânula de Karman 11 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício

## Fabricante:

Plasti-med Plastik Medikal Urünler San. ve Tic. Ltd. Sti.  
no 13 YA/9 Tuzla Orhanlı - 34956 - Tuzla - Istanbul area - Turquia

## Fornecedor:

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda  
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124  
SAC:(31) 36881901 www.medika.com.br

## Responsável técnico:

ENF Layse Miranda Ferreira COREN MG: 567.011/MG

**ANVISA nº: 10289680211**

Legenda da simbologia da rotulagem:

	<b>Lote</b>
	<b>Data de fabricação</b>
	<b>Data de Validade</b>
<b>REF</b>	<b>Referência</b>

Versão da instrução de uso – Vr.03

**Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.**

**Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: [qualidade@medika.com.br](mailto:qualidade@medika.com.br).**