

INSTRUÇÕES DE USO PARA O ADAPTADOR LUER LOCK PARA SISTEMA FECHADO DE TRANSFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS ANDEMED

Conectores e conexões

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para a utilização do adaptador luer lock para sistema fechado de transferência de medicamentos.

Indicações:

Os adaptadores luer lock estão indicados como acessórios para o sistema fechado de transferência de medicamentos (CSTD) Andemed (vendido separadamente) na preparação, reconstituição, combinação e administração de medicamentos, incluindo medicamentos antineoplásicos e perigosos, em atendimento à norma USP800 e às diretrizes EU 2022/431.

Descrição do produto:

Os adaptadores luer lock estão indicados como acessórios para o sistema fechado de transferência de medicamentos (CSTD) Andemed (vendido separadamente) na preparação, reconstituição, combinação e administração de medicamentos, incluindo medicamentos antineoplásicos e perigosos, em atendimento à norma USP800 e às diretrizes EU 2022/431. Os adaptadores são à prova de vazamentos e herméticos, reduzindo a exposição de vapores, aerossóis e vazamentos aos indivíduos e meio ambiente. Os adaptadores possuem modelos com ou sem tampa de proteção, com componente de vedação ou conector valvulado e conexão luer lock, de acordo com a necessidade.

Condições de manipulação:

- Estéril e apirogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Esterilizado a óxido de etileno.
- Validade do produto: 03 anos
- Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com os procedimentos.
- O fabricante recomenda uso único.
- O produto é de uso transitório.
- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante o procedimento de conexão dos adaptadores.
- Descarte o adaptador conforme RDC 222 de 28 de março de 2018 da ANVISA.
- Observe sempre a data de validade do produto.
- Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar os adaptadores.
- Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas entre 05 e 40°C.
- Descarte o produto conforme RDC 222 de 28 de março de 2018, da ANVISA.

Advertências e precauções:

Não se aplica

Contraindicações:

Não se aplica

Efeitos adversos:

Não se aplica

Instruções de uso:

- Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui o uso de luvas, máscara, campos e instrumentos estéreis.
- Abra a embalagem e verifique a integridade do produto bem como o seu correto funcionamento.
- Escolha o modelo de adaptador adequado ao procedimento.

- Encaixe o adaptador ao conector do sistema fechado de transferência de medicamentos Andemed (vendido separadamente), se necessário.

- Descarte o adaptador conforme RDC 222 de 28 de março de 2018 da ANVISA.

Informações técnicas:

Embalagem secundária: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 500g/cm. Cada embalagem secundária contém 900 embalagens primárias.

Embalagem primária: embalado em um lado papel grau cirúrgico revestido (membrana composta de pasta celulósica revestida de poliéster) e outro lado em Blister PET soft (politereftalato de etileno). Cada embalagem primária contém:

01 Adaptador luer lock para sistema fechado de transferência de medicamentos com ou sem tampa de proteção, com componente de vedação ou conector valvulado e conexão luer lock

Código

Modelo: **CSTDL1**

Código

Descrição

LL0101 Adaptador luer lock para sistema fechado de transferência de medicamentos com tampa de proteção e componente de vedação, conexão luer lock

LL0102 Adaptador luer lock para sistema fechado de transferência de medicamentos com tampa de proteção; componente de vedação externo e interno, conexão luer lock

LL0103 Adaptador luer lock para sistema fechado de transferência de medicamentos com conector valvulado e conexão luer lock

Fabricante: Shandong Ande Healthcare Apparatus Co. Ltd.
999, Zunxian Road, New & High Tech Zone, Zibo -
Shandong - China

Fornecedor: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-
124
SAC:(31) 36881901 www.medika.com.br

Responsável técnico: Enfa. Ana Cristina Almeida de Araújo
COREN: 555.068ENF

Registro ANVISA nº: 10289689059

Legenda da simbologia da rotulagem:



Lote



Data de Fabricação



Data de Validade

REF

Referência

Versão da instrução de uso – Vr.02

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido. Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br