

# INSTRUÇÕES DE USO PARA ESCOVA DE LIMPEZA PARA CANAL DE TRABALHO DE ENDOSCÓPICO E VÁLVULA MEDIKA

## INDICAÇÕES:

A escova está indicada para limpeza do canal de trabalho e válvula de endoscópios.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Escova para limpeza de canal de trabalho e válvula de endoscópios, descartável, com comprimento de tubo de 155 e 2300 mm. O corpo da escova é fabricado em POM, com cerdas em nylon. O rodo, no modelo escova e rodo, é fabricado em silicone.

## INSTRUÇÕES DE USO:

- Este produto é utilizado para limpeza do canal de trabalho e válvula do endoscópio.
- Confira cuidadosamente se o endoscópio está em boas condições.
- Escolha a escova no tamanho adequados para o procedimento. O diâmetro externo da escova deve ser menor do que o diâmetro do canal de trabalho e o comprimento deve ser maior.
- Abra a embalagem da escova de limpeza.
- Introduza a escova de limpeza e empurre cuidadosamente pelo canal de trabalho do endoscópio.
- Puxe a escova de limpeza pela extremidade distal e retire-a do canal de trabalho do endoscópio.
- O fabricante recomenda uso único, devido ao alto risco de infecção cruzada por tecido contaminado.
- Descarte os produtos conforme RDC 222 de 28 de março de 2018 da ANVISA.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas entre 5 e 40°C.

## FORMAS DE APRESENTAÇÃO

-Embalagem secundária: Saco plástico em PE. Cada embalagem secundária contém 200; 300 ou 500 embalagens primárias.

Embalagem primária: polietileno.

Cada embalagem primária contém:

Contém: 01 escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio, AA mm de comprimento, com dupla escova de XX e YY mm, com cerdas em nylon.

Modelos:

CB18-5010/23 01 escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio, 2300 mm de comprimento, com dupla escova de 10 mm e 05 mm, com cerdas em nylon.

CB18-5050/23 01 escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio, 2300 mm de comprimento, com dupla escova de 05 mm, com cerdas em nylon.

CB18-6060/23 01 escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio, 2300 mm de comprimento, com dupla escova de 06 mm, com cerdas em nylon.

CB18-4550/23 01 escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio, 2300 mm de comprimento, com escova de cerdas em nylon 05 mm e rodo de 4.5 mm, de silicone

CB13-5010/02 01 escova de limpeza curta para válvula de endoscópio, 155 mm de comprimento, com dupla escova de 05 e 10 mm, com cerdas em nylon.

CB13-50120/02 01 escova de limpeza curta para válvula de endoscópio, 155 mm de comprimento, com dupla escova de 05 e 12 mm, com cerdas em nylon.

**A escova de limpeza para canal de trabalho e válvula de endoscópio não se enquadra como produto para saúde.**

## ACESSÓRIOS

Relação das partes e acessórios a integrar o produto, assim como de todos opcionais e materiais de consumo por ele utilizados.

Não há.

## INDICAÇÕES, FINALIDADE E USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

A escova está indicada para limpeza do canal de trabalhos de endoscópios.

## PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, EFEITOS COLATERAIS, ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO.

Não aplicável.

**A escova de limpeza para canal de trabalho e válvula de endoscópio não se enquadra como produto para saúde.**

**FORNECEDOR:** HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda

Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124  
SAC:(31) 36881901 [www.medika.com.br](http://www.medika.com.br)

**FABRICANTE:** Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.

Room 2103, Building B, No. 9-2 Taihu East Road, Xinbei District, Changzhou - China

## Legenda da simbologia da rotulagem:



Lote



Data de fabricação



Data de validade

REF

Código do produto

Versão da instrução de uso – Vr.01

**Alerta!** Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.

Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: [qualidade@medika.com.br](mailto:qualidade@medika.com.br).