

# INSTRUÇÕES DE USO DA CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES SEMI AUTOMÁTICA BIOMEDICAL

## Introdução

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para a biópsia de tecidos moles com cânula.

## Indicações de uso

As cânulas estão indicadas para biópsia de tecidos moles, para análise histológica das amostras.

## Mecanismo de ação e descrição detalhada do produto

Cânula para biópsia de tecidos moles com empunhadura em policarbonato, cânula em aço inoxidável, descartável, disponível nos diâmetros 14,16 18 e 20G por 10, 15, 20 e 25 cm de comprimento, com limitador de profundidade, graduada, radiopaca. Cânula de biópsia para tecidos moles, em formato de guilhotina e de disparo semi automático. Possui um dispositivo que permite um duplo disparo para um corte preciso do fragmento de tecido, empunhadura ergonômica, mandril interno e uma ranhura que permite um corte preciso da amostra de tecido desejada. A cânula possui um ponto biótico, graduado em centímetros, com um limitador de profundidade. Seu mecanismo de ação consiste em um corte de fragmento regulado por um dispositivo na empunhadura, com seleção para um ou dois centímetros de fragmento, com disparo semi automático, por impulsão à mola.

## Esclarecimentos sobre o produto bem como seu armazenamento e transporte

- Esterilizado a óxido de etileno.
- Validade da esterilização: 05 anos.
- Proibido reutilizar conforme item 1 da RE2605 de 2006.
- Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com os procedimentos.
- A utilização da cânula é transitória (<60 min)
- O procedimento deve ser realizado sob fluoroscopia.
- Observe sempre a data de validade do produto.
- Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar as cânulas de biópsia.
- Os materiais perfurocortantes devem ser descartados conforme a RDC 222 de 28 de março de 2018, da ANVISA.
- Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas menores que 32°C.

## Contraindicações

- Sangramentos
- diátese hemorrágica
- infecção de pele na área de punção.

## Efeitos adversos

- As complicações incluem os riscos associados ao grau de intolerância ao procedimento ou à medicação usada durante o procedimento.
- infecção.
- sangramentos .
- Perfuração de órgãos.

## Precauções e Advertências

- Se houver resistência na implantação, nunca force a introdução da cânula.
- Monitore o paciente adequadamente.
- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante os procedimentos de introdução e manuseio das cânulas.
- Após a utilização das cânulas, evite contato acidental à mesma pelo alto risco de contaminação.
- Após a retirada da cânula, faça uma compressão eficaz no ponto de introdução para evitar sangramento. (de acordo com o protocolo do hospital).

## Instruções para utilização

- Posicione o paciente de acordo com a localização da biópsia desejada.
- Faça uma desinfecção no local.
- Siga as práticas convencionais para anestesia do local de inserção da cânula (de acordo com o protocolo do hospital).
- Faça uma incisão com o bisturi.
- Remova a proteção da cânula.
- Esta cânula possui duas posições que permitem coletar dois tamanhos de amostras diferentes: a primeira posição permite coletar amostras com 10 mm. A segunda posição permite coletar amostras de 20 mm.
- Carregue a cânula puxando o êmbolo até ouvir um clic na posição pré-determinada para 10 mm de corte ou retraindo mais o êmbolo até ouvir um segundo clic para a posição pré-determinada para 20 mm de corte.
- Com o mandril retraído, introduza a cânula até o ponto que se deseja analisar.
- Empurre o êmbolo com o polegar sobre o disparador, tendo o cuidado de não provocar o disparo para exteriorizar a área de corte do mandril.
- Aperte totalmente o êmbolo para que ocorra o disparo e corte do fragmento

desejado.

- Retire todo o sistema da cânula do paciente para retirar o fragmento cortado.
- Recarregue o êmbolo e empurre-o para retirar o fragmento cortado do compartimento de amostras.
- Após a retirada da cânula, faça uma compressão eficaz no ponto de introdução para evitar sangramento.

## Informações técnicas

Embalagem secundária: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 10 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado Tyvek® (membrana composta 100% de polietileno, sem aditivos) e o outro lado transparente em PEAD (poliestireno de alta densidade).

Cada embalagem primária contém:

01 cânula para biópsia de tecidos moles de guilhotina, com disparo automático, em aço inoxidável, YYG x ZZ cm.

01 dispositivo de segurança para descarte da cânula.

Tamanhos disponíveis:

## Tamanhos disponíveis para o produto

Código	Diâmetro externo	Comprimento
0BDS1410	14G x	10 cm
0BDS1415	14G x	15 cm
0BDS1420	14G x	20 cm
0BDS1610	16G x	10 cm
0BDS1615	16G x	15 cm
0BDS1620	16G x	20 cm
0BDS1810	18G x	10 cm
0BDS1815	18G x	15 cm
0BDS1820	18G x	20 cm
0BDS1825	18G x	25 cm
0BDS2010	20G x	10 cm
0BDS2015	20G x	15 cm



## Fornecedor

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda  
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124  
SAC:(31) 36881901 www.medika.com.br

## Fabricante

**biomedical**  
Biomedical Srl  
Via G.B.Lulli, 43- Florença - 50144  
Itália Telefax:39 055352678

## Responsável técnico

Enfª. Ingrid Neves COREN MG: 764.669-ENF

**ANVISA nº: 10289680098**

## Legenda da simbologia da rotulagem

	<b>LOTE</b>	Lote
	<b>DATA DE FABRICAÇÃO</b>	Data de fabricação
	<b>DATA DE VALIDADE</b>	Data de validade
	<b>REFERÊNCIA</b>	Referência

## Versão da instrução de uso – Vr.03

**Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.**

**Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br.**